



**PHILIPS**  
RESPIRONICS

*Amara View*

Podnosowa

Maska twarzowa

# Ciesz się widokiem

Żadna z wiodących masek nie zapewnia tak szerokiego pola widzenia\*

\* Testy wewnętrzne: dane z badań własnych

# Wysoka ocena za działanie, żadnych odcisnięć na grzbiecie nosa\*

Innowacyjna, unikatowa konstrukcja poduszki pod nos maski Amara View zapewni użytkownikowi najszersze\* pole widzenia spośród tych, które oferują wiodące maski twarzowe. Dzięki temu przed pójściem spać można nosić okulary, czytać lub oglądać telewizję. Oznacza to również większy komfort noszenia maski, ponieważ na grzbiecie nosa nie pojawiają się zaczerwienione ślady ani podrażnienia.\*



Pacjenci zgłaszali:

- o **20% łatwiejsze użytkowanie**\*\*<sup>(2)</sup>
- o **29% większy komfort użytkowania**\*\*<sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
- o **37% wyższą satysfakcję z ogólnej atrakcyjności**\*\*<sup>(2)</sup>

\* Testy wewnętrzne: dane z badań własnych

\*\* Badania sponsorowane przez firmę Philips Respironics i wykonane w dwóch ośrodkach klinicznych. Dziewięćdziesięciu pacjentów używało modelu Quattro i oceniało go, a następnie po ok. 30 dniach otrzymało maskę Amara View. Istotność statystyczna przy 95% zaufania, +1–5% z zastosowaniem sparowanego testu t i z porównaniem średnich wyników ocen od 0 do 10.

(2) wartość  $p < 0,01$

(3) wartość  $p = 0,015$

## Pomocne wskazówki dla użytkownika

- Mając lekko otwarte usta, należy sprawdzić, czy maska spoczywa na twarzy bez powodowania dyskomfortu. **Otwór w poduszce pod nos powinien znajdować się pod nozdrzami, a dolna część poduszki powinna być ułożona tuż nad podbródkiem. Paski upręży powinny znajdować się z dala od oczu.**
- **Najczęstszym błędem jest zbyt mocne zaciskanie upręży.** Uprząż powinna być luźno dopasowana, a jej ułożenie na twarzy powinno zapewniać komfort. W przypadku wystąpienia obrzęku skóry wzdłuż brzegów maski albo pojawienia się zaczerwienionych śladów na twarzy należy poluzować paski upręży.
- Dopasowując maskę, należy wypróbować różne pozycje ciała przyjmowane podczas snu, aż do uzyskania wygodnego ułożenia maski. Jeżeli dochodzi do nadmiernego wycieku powietrza, należy dokonać końcowej regulacji poprzez **dopasowanie długości górnego i dolnego paska oraz paska ciemieniowego. Ma to na celu zapobieżenie wyciekom, w których strumień powietrza dociera do oczu.** Pewna ilość wyciekającego powietrza jest zjawiskiem normalnym.

# Właściwe dopasowanie maski Amara View jest łatwe

Wystarczy wykonać poniższe instrukcje



1 Poluzuj paski upręży.  
Przekręć zapięcia  
upręży, aby ją odłączyć.



2 Dobierz rozmiar poduszki  
tak, aby pokrywała  
usta i przylegała  
do podstawy nosa.



3 Delikatnie przytrzymując  
maskę przy twarzy,  
naciągnij uprząż na głowę.



4 Upewnij się, że nos znajduje  
się nad **(a nie wewnątrz)**  
otworem na nozdrza  
w poduszce.



5 Wciśnij zaczepy upręży  
na swoje miejsce,  
aby je podłączyć.



6 Odciągnij paski mocujące,  
aby równo wyregulować  
dolny i górny pasek.



7 Wyreguluj pasek cieniowy  
tak, aby uprząż nie  
powodowała dyskomfortu.




8 Podłącz przewód  
elastyczny (dołączony  
do urządzenia CPAP  
lub Bi-Level) do przewodu  
szybkołącznego maski  
Amara View.

Więcej wskazówek dotyczących dopasowywania maski oraz informacje na temat regulacji pod kątem wycieków powietrza można znaleźć w naszych przewodnikach wideo: [sleepapnea.com/products/masks/amara-view/resources/](https://sleepapnea.com/products/masks/amara-view/resources/)

## Części maski Amara View

- 1 Pasek ciemieniowy uprząży
- 2 Pasek górny uprząży
- 3 Pasek dolny uprząży
- 4 Poduszka z portami wydechowymi
- 5 Szkielet maski
- 6 Łącznik kolankowy z zaworem bezpieczeństwa
- 7 Zapięcie uprząży
- 8 Zatrzaski szybkozłączne
- 9 Przewód szybkozłączny ze złączem obrotowym

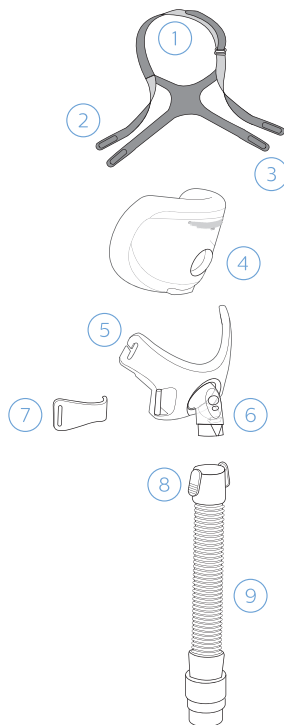

## Informacje na temat składania zamówień

Maska z uprzążą	Numer katalogowy
Maska mała (S)	1090662
Maska średnia (M)	1090663
Maska duża (L)	1090664

Części zamienne	Numer katalogowy
Przewód szybkozłączny	1090689
Poduszka mała (S)	1090692
Poduszka średnia (M)	1090693
Poduszka duża (L)	1090694
Uprząż, duża	1090696
Uprząż, standardowa	1090697
Zapięcie uprząży, 2 szt. w opakowaniu	1090698

## Więcej informacji na stronie

[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)

© 2015 Koninklijke Philips N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub ich właścicieli.



[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)

Broudy AP 11/xx/15 MCI 4107016 PN 1125960