



Trichlorol[®]

Preparat do dezynfekcji i mycia
powierzchni w pomieszczeniach,
sprzętu medycznego oraz namaczania
zanieczyszczonej bielizny pościelowej i odzieży szpitalnej.

Trichlorol[®]

- zawiera łatwo rozpuszczalną chloraminę T i detergenty
- szerokie spektrum biobójcze
- jednocześnie myje i dezynfekuje
- wykazuje działanie wybielające i dezodorujące



CE
0482

NEO[®]LAB



Trichlorol®

Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni w pomieszczeniach, sprzętu medycznego oraz namaczania zanieczyszczonej bielizny pościelowej i odzieży szpitalnej.

Wyrób medyczny kl. IIa

Preparat w proszku – stosować po rozpuszczeniu!

PODSTAWOWE CECHY Trichlorol

- preparat zawiera wysokiej jakości, łatwo rozpuszczalną chloraminę T,
- szerokie spektrum biobójcze, zwalcza: bakterie, prątki, grzyby i wirusy,
- nawet w niskich stężeniach wykazuje wysoką skuteczność wirusobójczą,
- dzięki detergentom ma doskonałe właściwości myjące,
- skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych,
- rozkłada zanieczyszczenia organiczne,
- aktywny chlor uwalnia się stopniowo, dzięki czemu woń chloru nie jest tak intensywna,
- zawiera substancje zapachowe maskujące typowy dla tej grupy produktów zapach chloru,
- ma działanie wybielające i dezodorujące,
- preparat może mieć zastosowanie w dezynfekcji i wybielaniu wyrobów wykonanych z naturalnych tkanin, jak np. mopy, ścierki, bielizna, odzież,
- nie uszkadza wyrobów wykonanych ze stali nierdzewnej i emaliowanej, szkła porcelany, większości tworzyw sztucznych, wyrobów z gumy i silikonu,
- proszek bardzo dobrze i szybko rozpuszcza się w zimnej wodociągowej,
- ekonomiczny w użyciu - z 1 kg proszku użytkownik uzyskuje, zależnie od zastosowanego stężenia – 200 litrów lub 133 litry roztworu roboczego.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU ROBOCZEGO

Roztwory robocze należy przygotować bezpośrednio przed użyciem. W celu przygotowania roztworu roboczego należy odważyć odpowiednią ilość substancji i dodać do uprzednio odmierzonej objętości wody wodociągowej o temperaturze max. pokojowej. Po dokładnym rozpuszczeniu proszku roztwór jest gotowy do stosowania. Substancję zawsze dodaje się do uprzednio przygotowanej wody, a nie odwrotnie. Każdorazowo, bezpośrednio przed użyciem roztwór należy dokładnie wymieszać.

Do roztworów roboczych nie należy dodawać detergentów i innych substancji chemicznych, gdyż mogą one znieść lub obniżyć skuteczność działania preparatu.

Podczas pracy z preparatem należy stosować rękawice ochronne.

SPEKTRUM BIOBÓJCZE ROZTWORÓW ROBOCZYCH

Spektrum biobójcze		Stężenie roztworu	Czas ekspozycji	Dozowanie na 1l wody
bakterie, grzyby, prątki gruźlicy		0.5 %	30 min	5 g
		0.75 %	15 min	7,5 g
wirusy:	HIV / HBV / HCV*	0.5 %	15 min	5 g
	Pełne wirusobójcze*	0.5 %	30 min	5 g
	Adeno; Papowa; Rota; Vaccinia	0.5 %	15 min	5 g

* wg RKI 01.2004

CE
0482



SPOSÓB UŻYCIA

Przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywać dokładnie za pomocą ścierek i mopów nasączonych roztworem preparatu.

Dezynfekcję dużych powierzchni przeprowadzać stosując metodę dwóch wiader.

Przedmioty, które można zanurzyć dezynfekować przez zanurzenie. Przedmioty powinny być całkowicie przykryte i wypełnione roztworem. Dezynfekcję bielizny, odzieży przeprowadza się przez zanurzenie w roztworze roboczym.

SKŁAD PREPARATU

100 g preparatu zawiera:

chloramina T 80 g

dodecylosulfonian sodu ≤ 10g

OPAKOWANIA HANDLOWE

Typ opakowania	Pojemność w g	Opakowanie zbiorcze - karton	Numer katalogowy
Puszka	500	1 szt.	L-1701-01
Puszki	500	10 szt.	L-1701-10
Wiaderko	5000	1 szt.	L-1720-01

Karta SDS na stronach internetowych www.medilab.pl

Producent: **Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH**, Berlin, Niemcy

Wyłącznie dystrybutor: **Medilab Sp. z o.o.**,

Dział handlowy: ul. 15-531 Białystok, ul. Niedźwiedzia 60, tel./fax (85) 743-28-97

www.medilab.pl

