

TESTY KONTROLI SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI

OK

propper

Wieloparametrowy test paskowy kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu w autoklawach

- Pasek wskaźnikowy OK Strip należy umieszczać wewnątrz sterylizowanych pakietów.
- Ekologiczny – nadruk wraz ze wskaźnikiem chemicznym pozbawiony metali ciężkich i substancji toksycznych.
- Atrament wskaźnikowy o wyjściowej kremowej barwie naniesiony został na przeciwległych końcach papierowego paska w formie litery K, strzałki oraz okręgu.
- Na wskaźniku znajduje się również czarna litera O, która jest w referencyjnym standardzie czerni.
- Po prawidłowym procesie sterylizacji kremowe zabarwienie atramentu wskaźnikowego na symbolach zmienia się na kolor czarny i pojawiają się: czarny napis OK, czarna strzałka i czarny okrąg.
- Paski wskaźnikowe OK Strip mogą być przechowywane jako dokument przebiegu sterylizacji, gdyż otrzymane zabarwienie atramentu wskaźnikowego nie ulega zmianie przez wiele lat.
- Wymiary wskaźników: 20,3 x 1,4 cm.
- Spełnia wymagania normy PN-EN ISO 11140, klasy 4.



Opakowania: 250 szt.

