

SKEDCO HELITAG HELICOPTER TAG LINE KIT LINOWY ZESTAW ANTYROTACYJNY DO ŚMIGŁOWCA

Producent: SKEDCO
Model: SK-1010

OPIS PRODUKTU:

Skedco Helitag to specjalnej konstrukcji zestaw antyrotacyjny stosowany podczas podnoszenia/wciągania noszy do śmigłowca. Dzięki niemu ratownik znajdujący się np. na ziemi może w bezpieczny sposób zapobiec rotacji oraz kontrolować podnoszenie noszy.

Niekontrolowana rotacja noszy podczas takich działań stanowi bezpośrednie zagrożenie dla pacjenta. Nosze w rotacji mogą obracać się z prędkością do 180 obr./min. To wystarczy, aby pacjent stał się „ludzką wirówką”. W takiej sytuacji płyny ustrojowe, siłą odśrodkową są wtłaczane do końców ciała, co finalnie może zakończyć się śmiercią pacjenta.

Zestaw Helitag składa się z ok. 91 metrów dobrej widoczności liny 5/16", która dzięki swojej budowie (polipropylenowy rdzeń z oplotem nylonowym) unosi się na wodzie. Na końcu liny znajduje się najważniejszy element zestawu mocowany do noszy za pomocą dwóch karabinków specjalnej konstrukcji tzw. „słabe ogniwo”. Jest to rodzaj bezpiecznika, który przy naprężeniu ok. 120–140 kg zrywa się. W przypadku awaryjnej sytuacji nieprzewidzianego zaplątania się liny np. o korony drzew lub maszty łodzi czy statków rozwiązanie to pozwala na „uwolnienie” śmigłowca.

To rozwiązanie stało się standardem wymaganym mi.in. na pokładach wszystkich helikopterów Army MedEvac oraz w wielu zestawach medycznych piechoty USA.

Zestaw nie jest przeznaczony do zjazdów na linie.

Cały zestaw dostarczany jest w torbie o średnicy ok. 18 cm i długości ok. 58 cm w kolorze Coyote Brown.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Standard wyposażenia śmigłowców USA Army MedEvac
- Bezpieczny, kompletny i gotowy do natychmiastowego użycia system zabezpieczający przez rotacją noszy podczas ewakuacji śmigłowcem
- Przeznaczony do zastosowania zarówno w trakcie działań na lądzie, jak i na wodzie
- Zastosowane „Słabe ogniwo” w postaci linki bezpieczeństwa pozwala na uwolnienie śmigłowca w przypadku zaplątania/zaczeplenia się liny antyrotacyjnej
- Szybki, intuicyjny montaż i demontaż systemu do noszy
- Możliwość zastosowania z innymi noszami ewakuacyjnymi np. z siatkowym koszem ratowniczym



DŁUGOŚĆ LINY GŁÓWNEJ	WYTRZYMAŁOŚĆ LINKI „SŁABEGO OGNIWA” SKEDCO	SIŁA ZERWANIA SYSTEMU „SŁABEGO OGNIWA” SKEDCO	MATERIAŁ
91 m	61 kg	120-140 kg	pływająca lina główna wykonana z polipropylenowego rdzenia z opłotem nylonowym „słabe ogniwo” – nylonowa linka

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

MODEL		
	SK-1010	Skedco Helitag Helicopter Tag Line Kit
KONFIGURACJA ZESTAWU	SK-1011	„Słabe ogniwo” - Linki bezpieczeństwa, opakowanie 10 szt.
	SK-1012	Lina do ratownictwa wodnego długości ok. 91 m
	SK-1013	Karabinek z blokadą D, czarny (2)
	SK-1014	Łącznik śrubowy
	SK-1015	Skedco Pasek w kształcie litery V
	SK-1016	Skedco Helitag torba - z piankowym pływakiem
AKCESORIA	SK-1011	„Słabe ogniwo” - Linki bezpieczeństwa, opakowanie 10 szt.

MODEL		NSN
SK-1010	Skedco Helitag Helicopter Tag Line Kit linowy zestaw antyrotacyjny do śmigłowca	6545-01-381-0654
SK- 1011	Linki bezpieczeństwa „słabe ogniwo” Skedco	6530-01-445-7291

KORZYŚCI:

- Zapewnienie możliwości i bezpieczeństwa ewakuacji pacjenta z ziemi do śmigłowca w sytuacji podejmowania noszy bez przyziemia
- Kompletny gotowy do użycia zestaw – pozwala na natychmiastowe zastosowanie bez potrzeby kompletacji. Zawiera wszystkie niezbędne elementy pozwalające na wielokrotne użycie bez potrzeby uzupełniania
- Zastosowane materiały pozwalają na uniwersalne zastosowanie zestawu zarówno w akcjach ratowniczych na lądzie, jak i na wodzie
- Zastosowanie przy torbie piankowego pływaka ułatwia działania prowadzone bezpośrednio z wody
- Zestaw jest od lat standardem wyposażenia Heli MedEvac USA Army – zweryfikowanym w realnych akcjach ratowniczych w tym w warunkach działań bojowych i znanym przez załogi śmigłowców USA Army
- Zgodność siły zerwania „słabego ogniwa” jest zgodna z zaleceniami laboratoriów badań aeromedycznych armii amerykańskiej, co gwarantuje przetestowane, skuteczne oraz bezpieczne zastosowanie systemu zarówno dla statku powietrznego, jak i personelu naziemnego
- System objęty NSN – zapewnia dostępność w ramach systemu logistycznego NATO



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
 Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
 Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

