

>> Dializatory niskoprzepływowe

Dializator kapilarny



Dystrubucja w Polsce

NTM-MED S.C.
Tel: 514 029 646 Faks: 95 783 25 52

Siedziba główna

SHANDONG WEIGAO BLOOD PURIFICATION PRODUCTS CO., LTD.
Tel: +86 631 5660598 Fax: +86 631 5660598

Międzynarodowa siedziba firmy

WEGO HEALTHCARE (SHENZHEN) CO., LTD.
19F, Building 3, Sunmax Technology Plaza, No.8 Keyuan
Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Tel: +86 755 33892500 Fax: +86 755 33892508
E-mail: info@wego-healthcare.com
www.wego-healthcare.com/en



Największy w Chinach
niezależny producent
dializatorów kapilarnych

Najważniejsze cechy produktu


1 Gładkie zakończenie cięcia

Skutecznie minimalizuje adhezję i uszkodzenia komórek krwi.




2 Błona kapilarna z polisulfonu (PSU)

Włókno membranowe z polisulfonu (PSU), będące międzynarodowym standardem materiałowym, zatrzymuje endotoksyny i ogranicza mikroreakcje zapalne u pacjentów, zapewniając lepszą biokompatybilność.

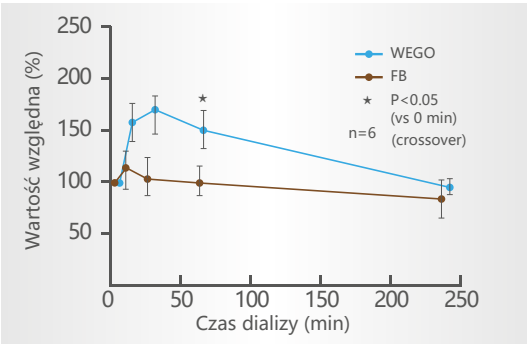

3 Konstrukcja włókna o strukturze mikrofalowej

Unikalna falista struktura wewnątrz dializatora ogranicza zjawisko kanałowania, zapewnia bardziej jednolity przepływ, lepszy transport dyfuzyjny oraz skuteczniejsze usuwanie małocząsteczkowych substancji.

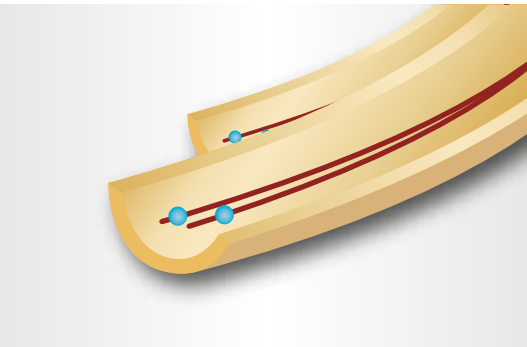

Specyfikacja techniczna

Parametry działania in vitro		F12	F13	F14	F16
Q _g =200mL/min	Współczynnik ultrafiltracji (mL/h·mmHg)	16	17	18	20
	Mocznik (mL/min)	180	185	190	195
	Kreatynina (mL/min)	167	171	174	179
	Fosforan (mL/min)	147	152	156	162
	Witamina B12 (mL/min)	97	101	105	113
Q _g =300mL/min	Mocznik (mL/min)	230	238	245	256
	Kreatynina (mL/min)	213	219	224	232
	Fosforan (mL/min)	175	183	190	201
	Witamina B12 (mL/min)	102	107	112	120
	Mocznik (mL/min)	257	267	276	291
Q _g =400mL/min	Kreatynina (mL/min)	231	239	246	258
	Fosforan (mL/min)	195	205	213	225
	Witamina B12 (mL/min)	108	114	119	129
KoA mocznika (mL/min)		629	698	767	902
Efektywna powierzchnia (m ²)		1.2	1.3	1.4	1.6
Objętość komory krwi (mL)		70	73	75	80

Warunki testowe

Klirensy: QD = 500 mL/min; QF = 0 mL/min
KoA: QB = 300 mL/min, QD = 500 mL/min
Współczynnik ultrafiltracji: krew bydlęca, zawartość białka: 60±5 g/L, TMP: 100 mmHg

Grubość ścianki / Średnica wewnętrzna	40µm/ 200µm	Materiał membrany	Polisulfon
Maks. TMP	500mmHg	Obudowa	Poliwęglan
Metoda sterylizacji	Sterylizacja promieniowaniem	Związek zalewowy	Poliuretan
Opakowanie	24 szt. / karton	Pierścień uszczelniający	Medyczny silikon

Uwaga: Produkty z tej serii charakteryzują się wysoką wydajnością ultrafiltracji i przepuszczalnością. Należy stosować wyłącznie z urządzeniami do dializy wyposażonymi w funkcję kontroli ultrafiltracji.