

Termiczna folia porodowa.

Utrzymuje naturalne ciepło ciała i wilgotność skóry.



Najważniejsze cechy:

- Transparentna, elastyczna folia ułatwiająca obserwację
- Wewnętrzna satynowana powierzchnia folii, przyjazna dla skóry nowoodka
- Nie przykleja się do wrażliwej skóry
- Całkowicie bezgłęboka i bezszelestna
- Łatwa i szybka w użyciu dzięki kwadratowemu formatowi z kapturem – gotowa do natychmiastowego użycia
- Zapewnia nieograniczony dostęp do pacjenta
- Odpowiednia do pierwszej opieki oraz transportu w zmiennych temperaturach
- Odpowiednia do stosowania w inkubatorze
- Idealna do stosowania podczas kontaktu skóra-do-skóry



Wyrpdukowano w Niemczech:

conceptnatal®, Im Michelreis 18, 72124 Pliezhausen, Germany

Phone +49(0)7127 9802601, Fax +49(0)7127 9802602

info@conceptnatal.de, www.conceptnatal.de

NatalWrap – Instrukcja użytkowania

PRZEZNACZENIE

Folia otulająca przeznaczona do skutecznej ochrony wcześniaków i noworodków przed poporodową utratą ciepła oraz wilgoci.

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

1. Przed porodem połóż folię NatalWrap płasko na materacu pod promiennikiem ciepła (rys. 1). **UWAGA:** Promiennik ciepła powinien być włączony w trybie wstępnego nagrzewania.

2. Połóż noworodka na satynowanej stronie NatalWrap (rys. 2) i umieść głowę dziecka w kapturze. **UWAGA:** Upewnij się, że drogi oddechowe dziecka są drożne i jak najszybciej przymocuj czujnik temperatury do skóry.

3. Owiń NatalWrap wokół całego ciała dziecka, najpierw zakładając dolną klapę na stopy (rys. 3), a następnie obie klapy boczne (rys. 4 i 5).

DANE TECHNICZNE

Numer referencyjny:	28-10-100
Wymiary:	50 cm × 50 cm z kapturem
Materiał:	poliuretan, jednostronnie satynowany, 65 µm, transparentny, wodoodporny, przyjazny dla skóry
Zastosowanie:	produkt jednorazowego użytku, niesterylny
Temperatura przechowywania	od 0°C do 50°C
Klasyfikacja:	wyrób medyczny klasy I zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem folii NatalWrap należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja nie zastępuje profesjonalnej oceny i opieki medycznej. Należy stosować się do procedur obowiązujących w danej placówce medycznej.

OSTRZEŻENIA

- NatalWrap jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Ponowne użycie może prowadzić do zakażenia, przerwania terapii, poważnych obrażeń lub śmierci.
- Produkt jest dostarczany jako czysty, ale nie jest sterylny.
- Nie przegrzewać folii NatalWrap. Unikać bezpośredniego kontaktu z elementami grzewczymi i źródłami ciepła.
- Nie zakładać NatalWrap na twarz dziecka. Drogi oddechowe muszą być zawsze drożne.
- Nie owijać dziecka zbyt ciasno.
- Zaleca się niezależne monitorowanie temperatury dziecka podczas stosowania.
- Nie używać produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub otwarte.
- Nie używać produktu dłużej niż 24 godziny.



KROBAN Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 270 p.1410
90 – 361 Łódź Polska

NIP: 7252296972 REGON:385452206
KRS: 0000827038
Kapitał zakładowy: 100.000 PLN

www.kroban.pl

info@kroban.pl

Tel. : 512 046 260

Fax: +42 288 48 30