

PLIWA® Quick + Clean Wipes

Suche ręczniki flizelinowe do nasączenia preparatem PLIWA Fresh Lemon AF do czyszczenia dekontaminacyjnego sprzętu i dłoni

Duże ręczniki z wysokiej jakości absorbentu do wycierania zanieczyszczonych biologicznie powierzchni ułatwiają szybkie usunięcie zanieczyszczenia i natychmiastowe zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz otoczenia pacjenta. Praktyczna wielkość ręcznika zapewnia, że czyszczeniem można objąć większą powierzchnię, a sam proces wykonać szybciej i skuteczniej. Możliwość magazynowania zapasu produktu bez obawy o utratę właściwości i wilgotności oraz nieskomplikowany sposób przygotowania produktu do użycia jest nowatorskim rozwiązaniem. Aktywny na szczepy antybiotykooporne, w tym MRSA

Przeznaczenie i użycie

- czyszczenie dekontaminacyjne powierzchni: powinno być prowadzone z zamiarem zebrania nieczystości potencjalnie zainfekowanych. W przypadku kontaktu powierzchni z wydzieliną, wydalina powierzchnię przetrzeć chusteczką wyjętą bezpośrednio z pojemnika. Powierzchnię zainfekowaną poddać dezynfekcji preparatem o szerokim spektrum działania. Produkt wskazany w praktyce lekarskiej, stomatologicznej do dekontaminacji podręcznego sprzętu, uchwytów, zamknięć, obuwia OP, tablic, obudów sprzętu, stołów operacyjnych, ram łóżek, gumowanych materacy, wanien łazienkowych, desek toaletowych z wyłączeniem powierzchni wrażliwych na alkohol, np. szkło akrylowe itp. W miejscach trudnodostępnych i rogach spryskać preparatem Pliwa Lemon Fresh AF i po czasie ekspozycji wytrzeć ręcznikiem PLIWA Quick+Clean Wipes Produkt do stosowania tylko na gładkiej powierzchni. Materiałem używanym do produkcji chusteczek jest flizelina celulozowa, dlatego w wyniku ich kontaktu z powierzchnią szorstką nie można wykluczyć ich ścierania się lub też powstawania włókien.
- czyszczenie dekontaminacyjne rąk: powinno być przeprowadzone z zamiarem usunięcia zanieczyszczeń rąk spowodowanych kontaktem z materiałem biologicznym, wydalina lub wydzielina. Ręce po czyszczeniu powinny być poddane dezynfekcji preparatem alkoholowym. Po spełnieniu czasu ekspozycji ręce należy umyć z zastosowaniem środka myjącego.

Składniki i właściwości produktu

Pojemnik PLIWA Quick+Clean Wipes zawiera 70 szt. lub 90 szt. ręczników z flizeliny (50g/m²) o wymiarach 30 cm x 30 cm odpornych na rozierwanie, nie pozostawiających włókien. Zalane preparatem nasączającym, odpowiednio ilością 1,5 litra lub 2,0 litrów Pliwa Lemon Fresh AF, suche chusteczki w pojemniku do napełniania po ok 30 min. są równomiernie nasączone i gotowe do użycia. System stanowi oszczędne w użyciu połączenie absorbentu z preparatem dezynfekcyjnym. Stabilny i solidny pojemnik z uchwytem i specjalnym zamknięciem stanowi o wysokiej ergonomii korzystania z systemu. Szczelne zamknięcie zapewnia zdolność utrzymania właściwości produktu i preparatu przez 28 dni. Preparat nasączający PLIWA Lemon Fresh AF jest certyfikowany w Niemczech przez VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej). Opis preparat nasączającego PLIWA Lemon Fresh AF zawarty jest odrębnie.

Opis produktu i przygotowanie do użycia

Do pobrania ręczników do użycia należy otworzyć pojemnik (wiadko) podnosząc niebieską przykrywkę oraz wziąć potrzebną ilość chusteczek jednorazowego użytku, po czym proszę zamknąć pojemnik. Powierzchnie i przedmioty należy dokładnie powycierać. Zużyte chusteczki należy zneutralizować. Dokładnie przestrzegać czasu ważności i czasu działania, który wg. VAH wynosi do 28 dni przy 5-minutowym czasie ekspozycji. Na załączonej etykiecie dodatkowej po przygotowaniu produktu należy nanieść nazwę produktu, płynu dezynfekcyjnego, numer serii, okres ważności i przydatności, czas działania preparatu oraz zamieścić podpis osoby przygotowującej produkt do użycia.

Nowe napełnienie pojemnika (wiadra):

1. otworzyć pokrywę pojemnika; jeśli pojemnik był wcześniej napełniany dla zabezpieczenia się przed oblanie pozostałością płynu należy założyć fartuch ochronny i rękawice ochronne;
2. całkowicie opróżnić pojemnik;
3. używany wcześniej pojemnik przed ponownym napełnieniem gruntownie (dokładnie) umyć gorącą wodą i zdezynfekować małą ilością PLIWA Lemon Fresh AF;
4. pojemnik napełnić właściwą rolą ręczników jednorazowych (70 szt. lub 90 szt.) oraz zalać odpowiednią ilością PLIWA Lemon Fresh AF z foliowego pojemnika; należy zwrócić uwagę, by preparat dezynfekcyjny został równomiernie nalany na rolkę ręczników;
5. wyciągnąć początek roli (od środka) przez otwór w pokrywie pojemnika;
6. zamknąć pokrywę pojemnika poprzez równomierne naciśnięcie na brzegu pojemnika; należy upewnić się, że pojemnik jest całkowicie i szczelnie zamknięty, by uniknąć wyparowania PLIWA Lemon Fresh AF;
7. na pojemniku podać datę wykonania czynności napełnienia wraz z nazwiskiem osoby napełniającej, nr serii preparatu dezynfekcyjnego, datę ważności preparatu dezynfekcyjnego do użycia (z woreczka do napełniania), datę przydatności produktu (28 dni od dnia napełnienia);
8. po okresie przydatności produktu, tj. po 28 dniach od dnia napełnienia należy usunąć pozostałe nieużyte chusteczki;
9. pojemnik po gruntownym oczyszczeniu i zdezynfekowaniu wykorzystać do następnego napełnienia.



Producent:

L.C. PLIWA®

D-34323 Malsfeld-Ostheim, Pliwa-Straße 2
tel. +49 5661-7317-0, fax +49 5661-7317-10
e-mail: info@pliwa.de, www.pliwa.de

Dystrybutor:

DEZYMED® Jodko i wsp. Sp. j.

Biurowe handlowe:
ul. Mickiewicza 33, 11-300 Biskupiec
tel. 89 7154532, fax 89 7152362
e-mail: biuro@dezymed.pl, www.dezymed.pl

PLIWA[®] Quick + Clean Wipes



Elementy systemu:

- wiaderko o pojemności 3 litrów do 70 szt. ręczników i płynu 1,5 litra;
- wiaderko o pojemności 5 litrów do 90 szt. ręczników i płynu 2 litry;
- pakiet z rolą 70 szt. ręczników do wiaderka o pojemności 3 litrów i płynu 1,5 litra;
- pakiet z rolą 90 szt. ręczników do wiaderka o pojemności 5 litrów i płynu 2 litry;
- pojemnik z płynem 1,5 litra do 70 szt. ręczników i wiaderka o pojemności 3 litrów;
- pojemnik z płynem 2 litry do 90 szt. ręczników i wiaderka o pojemności 5 litrów.

Ostrzeżenia:

- przy napełnianiu pojemnika z ręcznikami preparatem PLIWA Lemon Fresh AF zachować środki ostrożności przewidziane dla preparatu;
- dla zabezpieczenia się przed obłaniem się należy założyć nieprzepuszczalny fartuch ochronny;
- przy przygotowaniu zestawu bądź przy otwartej pokrywie wiaderka nie palić tytoniu.

Ekspertyzy potwierdzające:

Dr. Holder Brill, Hamburg:

- opinia z dnia 28.05.2008 r. zastosowaniu środka dezynfekcyjnego PLIWA Lemon Fresh AG z włókniną w systemie PLIWA Quick + Clean Wipes do dezynfekcji powierzchni.

Rejestracje:

- Rejestracja wyrobu medycznego UMDNS 17-920;
- Certyfikat CE nr z dn. DEKRA 0124
- Certyfikat VAH nr N8/173 z dn. 11.12.2008 r.;
- Certyfikat nr N-35508 rejestracji produktu biobójczego w BAuA(Federalny Urząd Ochrony i Medycyny Pracy);

Pochodne produkty:

PLIWA[®] LEMON FRESH AF – opakowania 1 litr, 5 litrów i 10 litrów;

PLIWA[®] LEMON FRESH TÜCHER AF – pudełka zawierające po 90 / 120 / 200 szt. chusteczek;

PLIWA[®] LEMON FRESH TÜCHER AF – wkłady zawierające po 90 / 120 / 200 szt. chusteczek.