



TASKI Sprint Degerm

Preparat do mycia i dezynfekcji podłóg i wyposażenia pomieszczeń w placówkach służby zdrowia.

Taski Sprint Degerm to preparat do mycia i dezynfekcji o przyjemnym zapachu, charakteryzujący się łatwością użytkowania oraz wysoką skutecznością mikrobójczą w niskich stężeniach roztworu roboczego i krótkim czasie działania.

Właściwości

Postać: przezroczysta ciecz
Gęstość w 20°C: ok. 1,02 g/cm³
pH (koncentrat, w 20°C): ok. 11,0

Skład chemiczny


100 g preparatu zawiera jako substancje aktywne: czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetyl, chlorki; kationowe środki powierzchniowo czynne 5-15%, niejonowe środki powierzchniowo czynne 5-15%



Cechy

- szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (w tym Tbc), grzyby, wirusy;
- nie zawiera aldehydów, chloru i fenolu i innych lotnych substancji aktywnych;
- nie pozostawia smug;
- przyjemny zapach;
- możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych;
- bardzo dobre właściwości myjące;
- aktywny w niskich stężeniach roboczych;
- można stosować do powierzchni i urządzeń mających jak i niemających bezpośredniego kontaktu z żywnością;
- szeroka kompatybilność materiałowa;
- preparat bezpieczny dla ultra-włókien i mikrowłókien;
- możliwość dozowania przy pomocy automatów dozujących QFM R-Gab High Flow.



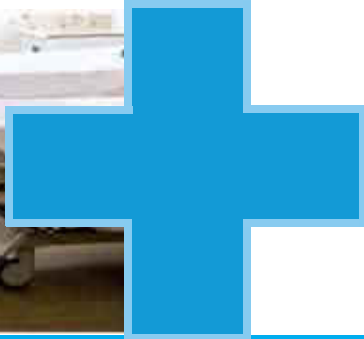

TASKI Sprint Degerm

Spektrum działania	Stężenie %	Czas działania
Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni i sprzętu w placówkach służby zdrowia	0.5%	5 minut
Bakterie, grzyby <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus faecalis</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Proteus mirabilis</i> <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Salmonella enterica</i> <i>Candida albicans</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0.5%	5 minut
Prątki <i>Mycobacterium avium</i> <i>Mycobacterium terre</i>	0.5%	15 minut
Wirusy <i>BVDV (HIV, HCV, HBV)</i> , <i>Rotavirus</i> <i>Vacciniawirus</i> <i>Adenowirus</i> <i>Norowirus</i>	0.5% 0.5% 1.0% 2.0% 3.0%	15 minut 5 minut 15 minut 30 minut 15 minut
Parametry działania wg metodyki PZH B, F	0.5%	15 minut

Wszystkie parametry skuteczności mikrobójczej zostały wykonane zgodnie z normą EN 14 885 (co najmniej faza II etap I), metodą Państwowego Zakładu Higieny oraz zgodnie z wytycznymi Instytutu Roberta Kocha Niemcy.

Atesty, pozwolenia

pozwolenie Ministra Zdrowia nr 3544/08

Dostępne opakowanie

kanister: 5L

nr SKU: VG12467

Data ważności

24 miesiące od daty produkcji (na opakowaniu).

Warunki przechowywania i środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem

Taski Sprint Degerm znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Sposób użycia

- Przygotować roztwór roboczy środka przez rozcieńczenie w zimnej lub letniej wodzie (max 40°C) w stężeniu odpowiednim do wybranego spektrum biobójczego i czasu ekspozycji.
- Podczas pracy z koncentratem jak i roztworem roboczym stosować rękawice ochronne.
- Dezynfekowane powierzchnie myć przy pomocy ścierek, mopów lub mechanicznych urządzeń myjących.
- Przedmioty, które można zanurzyć, dezynfekować przez zanurzenie, tj. przedmioty powinny być całkowicie przykryte i wypełnione roztworem.
- Po procesie mycia i dezynfekcji nie ma konieczności spłukiwania powierzchni.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.

Łatwe i bezpieczne sporządzanie roztworów roboczych gwarantują nasze systemy dozujące.



Urządzenie dozujące Diversey
Pompa QFM R-Gab High Flow



Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5; 00-446 Warszawa

tel.: 22 328 10 00; fax: 22 328 10 01

marketing.jd-pl@diversey.com

Diversey
for a cleaner, healthier future™